

Silla Cómodo Ducha de Lujo Gris Desarmable

Código: R203070

Contenido:

| | |
|--|--------|
| Chasis Superior c/Respaldo de Tapicería | 1 pza |
| Asiento Acojinado de Tapicería Desmontable | 1 pza |
| Cubeta y Tapadera Desmontable | 2 pzas |
| Descansapiés Desmontable | 1 pza |
| Perillas de Sujeción | 4 pzas |

Instrucciones de Ensamble:

- 1 Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble Chasis

- 1 Una vez que haya retirado el Chasis Inferior del empaque, coloquelo sobre la superficie plana.
- 2 Sobreponga el Chasis Superior al Inferior e inserte los tubos conectores traseros izquierdo y derecho, sobre sus similares en el Chasis Inferior.
- 3 Inserte las Perillas de Sujeción derecho e izquierdo en los orificios correspondientes a la inserción anterior.

Instrucciones de Ensamble Descansapiés:

- 1 Inserte el descansapiés en los dos soportes laterales del Chasis Inferior, tal como se muestra en el Gráfico 2.
- 2 Presione el botón que se encuentra en el descansapiés y embone en el orificio del soporte en la llanta.

Instrucciones de Ensamble Cubeta:

- 1 Enbone la Cubeta con o sin Tapa, en las ranuras debajo del Chasis Inferior.

